

## RapidFlap SD™ LS (resorbierbar)

### Schnelle und zuverlässige Fixierung von kranialen Knochendeckeln in 3 Schritten



Positionieren Sie mindestens drei Klammern entlang der Kraniotomielinie und setzen Sie den Knochendeckel wieder in seiner Originalposition ein. (Im Gegensatz zu den Titanklammern ist nur eine Größe mit 14mm Teller erhältlich.)



Halten Sie eine Klammer mit der einen Hand am blauen Griff in Position und ziehen Sie leicht vom Kopf weg. (Der untere unverzahnte Tellerrand wird so von unten an die Innenfläche des Schädelknochens herangedrückt.)

Drehen Sie mit der anderen Hand den oberen Teller soweit gegen den Uhrzeigersinn, bis seine Verzahnung auf der Knochenoberfläche greift. Drehen Sie nun den Griff im Uhrzeigersinn, bis er absichert - die Klammer sitzt nun fest.

Verfahren Sie auf diese Weise mit allen eingesetzten Klammern.



Schneiden Sie den überstehenden Pfosten mit dem Schneidebügel des HeatPen ab, so dass etwa 2-3 Millimeter des Pfostens stehen bleiben. Glätten Sie danach den Pfostenrest, indem Sie die Konturierungsspitze des HeatPen nach und nach axial von oben auf den Pfosten drücken und so einen pilzförmigen Schmelzblock erzeugen.

Falls eine Klammer wieder entfernt werden muß, schneiden Sie den aus dem Teller herausragenden pilzförmigen Pfostenrest einfach mit dem Schneidaufsatz des HeatPen ab.